

取扱説明書

モノタロウ ポイズンリムーバー 2WAYカップ付

注文コード: 21467655

このたびは、ポイズンリムーバー 2WAYカップ付をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

警告 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。

注意 この表示は、注意事項を無視して誤った使い方をした場合に、「ケガや傷害を負うこと、製品の破損やそれに伴う財産の損害が発生するおそれがある」内容です。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。


警告

- 事前に取扱説明書を読み、器具を実際に使用して使い方に慣れておくようにしてください。
- 本品の使い回しはお止めください。
- 吸引している状態で無理やり皮膚から吸引カップを外さないでください。
- 本品は子供の手の届かない場所に保管してください。
- 樹脂製品アレルギーのある方は使用しないでください。
- 用途以外の使用はおやめください。

注意

- 本品の使用はあくまでも医師の手当てを受けるまでの応急処置です。必ず専門医の治療を早急に受けてください。
 - 処置した後は洗浄・消毒を行い、軟膏や絆創膏などで皮膚のケアを行ってください。
 - 吸引時にかなりの出血がある場合、本体のポンプ内部にまで血液が入った際は、再利用せず使い捨ててください。
 - 体質によっては吸引した部分のうっ血がひどくなる場合がありますので、その時は使用を中止するか1回の吸引時間の間隔を短くしてご使用ください。
- ※ まぶたや口びるなど皮膚の敏感なところには、使用しないでください。

2 各部の名称

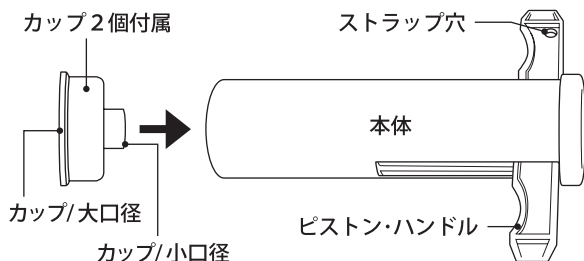


3 カップの取り付け

- 大口径と小口径がありますので、吸引する患部に合わせてどちらかを選び、セットしてください。
- 子供の指や、大人の小指には小口径がむいています。


カップは上下で2サイズで使用できます

大口径 吸い込み口φ21.5mm
患部が広い場合は、大口径

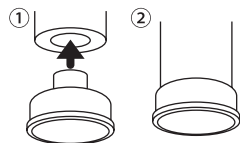

カップの「小口径」側を、シリンダー本体に指し込みます。

小口径 吸い込み口φ6mm
患部が広い場合は、小口径

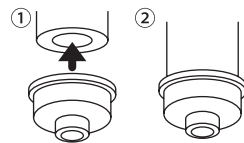

カップの「大口径」側を、シリンダー本体に指し込みます。

4 吸引方法

【吸引する前に】

① かまれたり、刺されたりしても絶対に慌てない

- 動くと血液の循環がよくなり、毒素のまわりが早まります。

② 傷口を切らない

- ナイフやピンセットで傷口を広げないで下さい。
雑菌が入るなど危険です。
- 傷口付近に体毛がある場合は、吸引効果を高めるため、安全カミソリ等で毛を剃って下さい。

【吸引開始】

ピストン・ハンドルを引き上げます。



【吸引解除】

ピストン・ハンドルは自然に元に戻ります。



【吸引した後に】

- ① 最後にピストン・ハンドルから指を離し、引きあげるのをやめ、ピストン・ハンドルが元の位置まで戻ってから外します。
- ② 皮膚表面に出てきた毒液をキレイな水で洗い流し、消毒後、傷絆創膏で覆います。