


各部の名称と同梱品

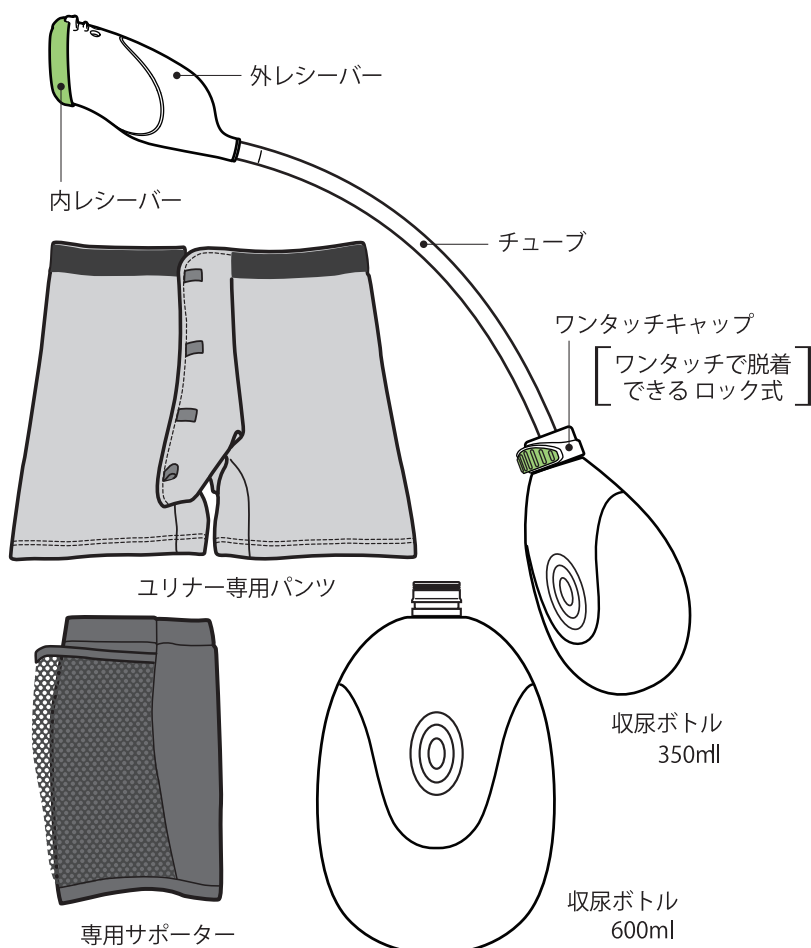

材質

- ・レシーバー / シリコン
- ・専用パンツ / ポリエステル
- ・キャップ / ポリアセタール (POM)
- ・専用サポーター / ナイロン
- ・チューブ / ポリ塩化ビニル (PVC)
- ・収尿ボトル / ポリエチレン (PE)

Q&A

よくあるご質問

【Q】漏れない(失敗しない)コツは？

漏れないためには、2つのポイントをご確認ください。

1. レシーバー(受尿器)が外れないこと
2. 高低差が保たれていること

どうしても上手く使えないというユーザー様は、弊社問い合わせ窓口へご連絡をお願いいたします。

【Q】交換の目安は？

チューブの硬化・劣化が交換の目安です。汚れたパーツごとにお求めいただく事も可能です。また小まめに洗浄、清潔を保つことで長くご使用いただけます。

【Q】洗浄の頻度はどれくらいですか？

不衛生な状態は感染症のリスクが高まるため、最低1日に一度は洗浄してください。

【Q】臥位(寝た状態)での使用は、できますか？

車いすユリナーは、車いす(座位)専用の集尿器です。就寝時など寝た状態で使用したい場合は、別商品のダンディユリナーをお求めください。

保証・返品について

※ 商品の返品・交換について

衛生商品のため、一度使用された場合は返品をお断りしております。万一、お届けした商品が破損していた場合は、お手数ではございますが到着後10日以内にご連絡ください。送料当社負担で良品とお取替えいたします。

注意事項

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。



- ・使い慣れるまでは、万が一に備えて処置できる場所(ご自宅等)でご使用下さい。また、よく慣れるまで練習をして、適切にご使用下さい。

- ・皮膚に異常がみられた場合は、ただちに使用を中止して下さい。
- ・体質によっては長時間の装着により、かゆみ、かぶれ等が生じることもあります。
- ・臭いや感染症のもととなる細菌やカビの繁殖を防ぐため、各部品の洗浄、消毒乾燥など衛生面には十分注意して下さい。また、使いまわしは厳禁です。
- ・本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではありません。
- ・当社が推奨する方法以外で本製品を使用した場合、身体的障害またはその他の損失に対して一切責任は負いません。
- ・尿の流れを確保するため、レシーバーと収尿ボトルとの高低差をつけてご使用下さい。
- ・直射日光を避け、室温で乾燥した場所に保管して下さい。

お問合せ・ご連絡窓口

朝日産業株式会社 医療機器事業部
Tel (052) 684-6829
FAX 052-671-5196
MAIL: medical@asahi-sg.co.jp

■ 商標出願中

製造・販売元

ユーザーニーズから排泄ケアのイノベーション

朝日産業株式会社

〒456-0051

名古屋市熱田区四番一丁目11番22号

装着式男性用集尿器

車いすユリナー

ご使用の手引き

自分の感覚で排尿できると
ご本人はいきいきします。

車いすユリナーを快適にご利用いただくためには、この用具の特徴を理解し、慣れることが重要です。初めに失敗してもご使用をやめず、正しい使い方のポイントを理解しながら排尿自立できるようにすることが大切です。



ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法をよくご理解のうえお使い下さい。お読みになった後は、必ずいつでも見られるところに保管して下さい。

装着の仕方



・使い慣れるまでは、万が一に備えて防水シートを敷くなど、車いすやクッションが汚れないようにしてご使用下さい。

ご使用にあたって

● ユリナー専用パンツの固定方法


固定方法の
動画はこちら




自分で固定する
動画はこちら



1 専用パンツを履き、
前面のマジックテープを全て開く

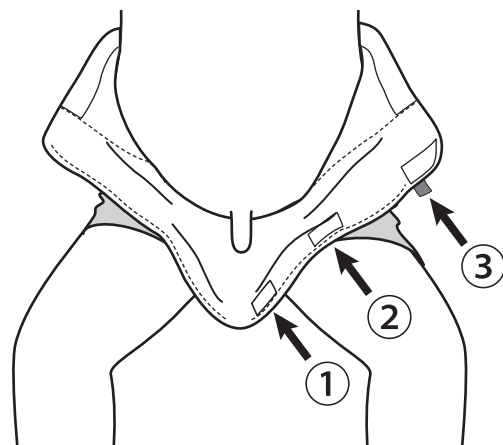


2 ペニスをレシーバーの中に納める
(レシーバーをあてがう)

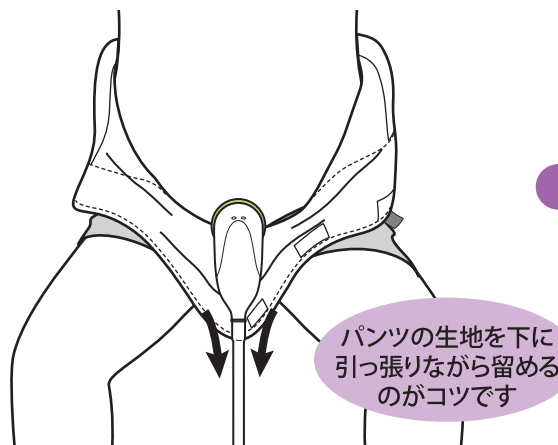

パンツの生地を下に
引っ張りながら留める
のがコツです


3 先端のマジックテープ（①部分）
は、チューブを包むように留める

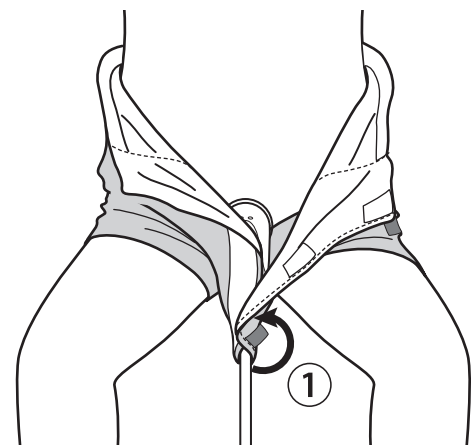


6 完成です



5 上部（③部分）の
マジックテープを留める

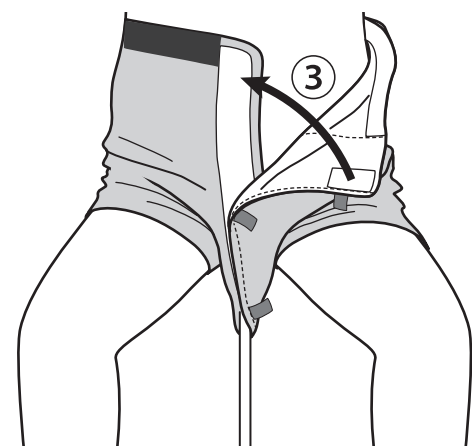


4 真ん中（②部分）の
マジックテープを留める

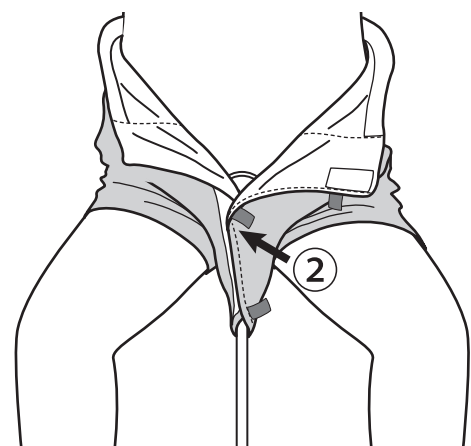

● ユリナー専用サポーターの装着方法

ふくらはぎの内側にポケット
がくるように履く

集尿ボトルをポケットに
収める

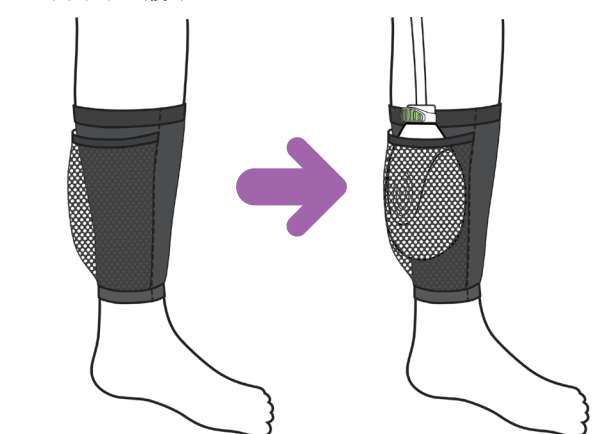

ワンタッチキャップ
脱着方法の
動画はこちら



チューブの角度に注意して下さい。

ユリナーは、重力を利用して収尿する構造です。レシーバー（ペニス）が
一番高い位置にないと尿が収尿ボトルにうまく流れず、逆流します。



レシーバーよりチューブが
低いので、尿がボトルへ
流れません。



レシーバーよりチューブが
高いため、尿がボトルへ
流れません。

手入れの仕方

毎日のお手入れ〈汚れの除去・洗浄→消毒→すすぎ→乾燥〉

● 汚れの除去・洗浄


適当な容器で、トイレ用中性洗剤を薄めた水またはぬるま湯に数分間浸した後、柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。収尿ボトル内部の汚物除去は歯ブラシ等を使うと便利です。

※ 内レシーバーと外レシーバーは分解して洗浄して下さい。


1 風呂桶等にぬるま湯を入れ、トイレ用中性洗剤を混ぜてしばらく浸す



2 柔らかいスポンジで、汚れを除去する

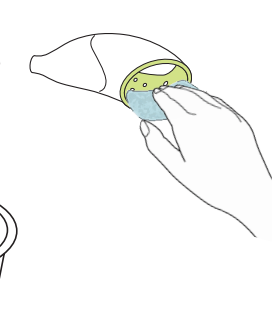


3 水で洗い流す

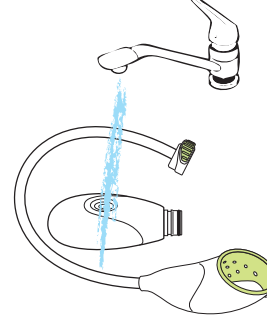


● 消毒

1 消毒液をボトルに入れ、
チューブにセットする。

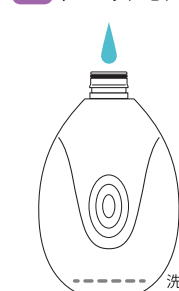


※ 消毒は、市販の消毒用エタノール（濃度80%前後）を希釈せずにそのままお使い下さい。

2 ボトルを逆さまに持って、正面の
◎印部分を指でゆっくり数回押し、
カップの内部まで消毒液を
ブクブクさせて洗う。

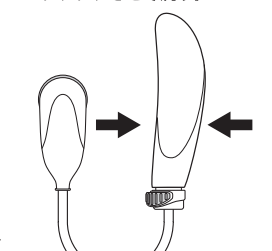

※ この時、レシーバーの中を覗き
込まないで下さい。消毒液が
目に入ると危険です。

3 元に戻して消毒液を
捨てたら洗浄完了。
ふたたびキャップに
セットします。

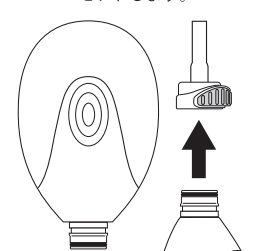

● すすぎ・乾燥

水またはぬるま湯でしっかりとすすぎ、陰干しで充分乾燥させて下さい。


● 都度のお手入れ

・収尿ボトルに貯まった尿を捨てた後は、必ずボトルを水洗いして下さい。
・臭いや汚れが気になる場合は、必要に応じてレシーバーをこまめに水洗いして下さい。

● 汚れが目立つときは

長期の使用での尿石や蛋白質などの汚れは、クエン酸溶液（5%程度）に20分程度浸して汚れを除去し、洗浄して下さい。また市販の尿瓶用錠剤などもお使いいただけます。

レシーバーとチューブの組み方

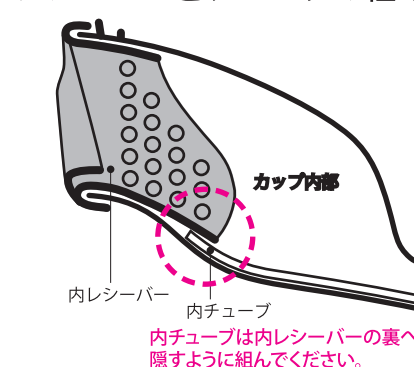

おすすめアドバイス

収尿ボトルの口元についている「ゴム製のリング」へ、ワセリン等の潤滑剤を塗布して頂くと、より滑らかに脱着できます。

