

親指の CM 関節サポーター 取扱説明書

使用前に必ずお読みください！

取扱説明書

【 使用目的 】

親指の固定(サポーターとして)使用してください。CM 関節での使用例があります。

【 使用方法 】

1. M、L 2 サイズの左右がありますので適合サイズをご使用ください。
2. 製品を袋から取り出して指に合わせます。
アルミ板挿入部を指の形状に合わせて曲げてください。(図 1)
3. 手首巻き付け部を手首に回して取り付けます。
指巻き付け部を取り付けます。(図 2)

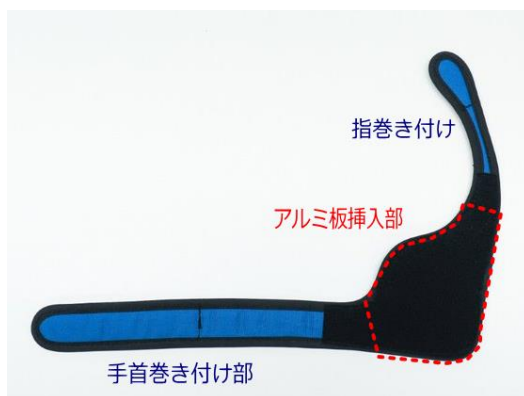


図 1



図 2

【 使用上の注意 】

1. 傷口の開放や包帯を取ってのご使用はしないでください。
2. 一人用です。
3. 使用者は医療従事者の許可のもと使用してください。(推奨)
4. 皮膚が締付けにより異常(皮膚異常と締付けによる血行異常)がありましたら直ちに中止してください。
5. 小児には使用しないでください。
6. その他異常を感じたら直ちに使用を中止してください。

【 洗濯 】

手洗い、自然乾燥

【 包装・材質 】

1 袋 1 枚入り 材質: 素材(ポリエステル100%)、ベルクロ(ナイロン 100%)、パイアステープ(ポリエステル 65% 綿 35%)、アルミ

【 製造販売業者の名称及び住所等 】

株式会社メディカルプロジェクト

静岡県葵区大鋸町 1 番地の 12

電話番号 054-252-1141