


# 組立・取扱説明書 レスキューボードベンチ


BC-309-118-3 ブルー  
BC-309-118-5 オレンジ  
BC-309-118-6 グレー

このたびは「レスキューボードベンチ」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
製品を安全にお使いいただくために、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、お読みになった後は本書を大切に保管してください。

## 部品内容

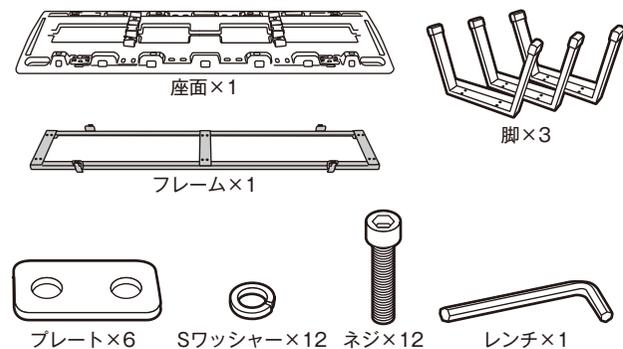


## 各部名称

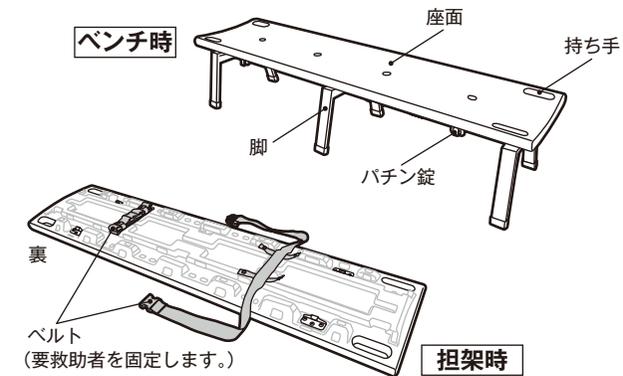


## 組立方法

① フレームの中央部分に図のように脚を取り付けます。

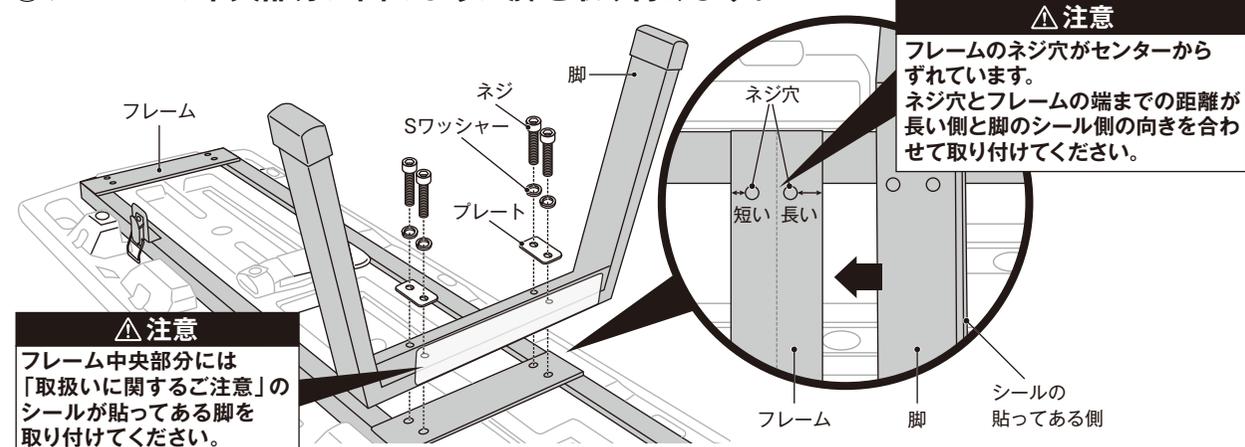

② 図のようにフレームの端に脚を取り付けます。

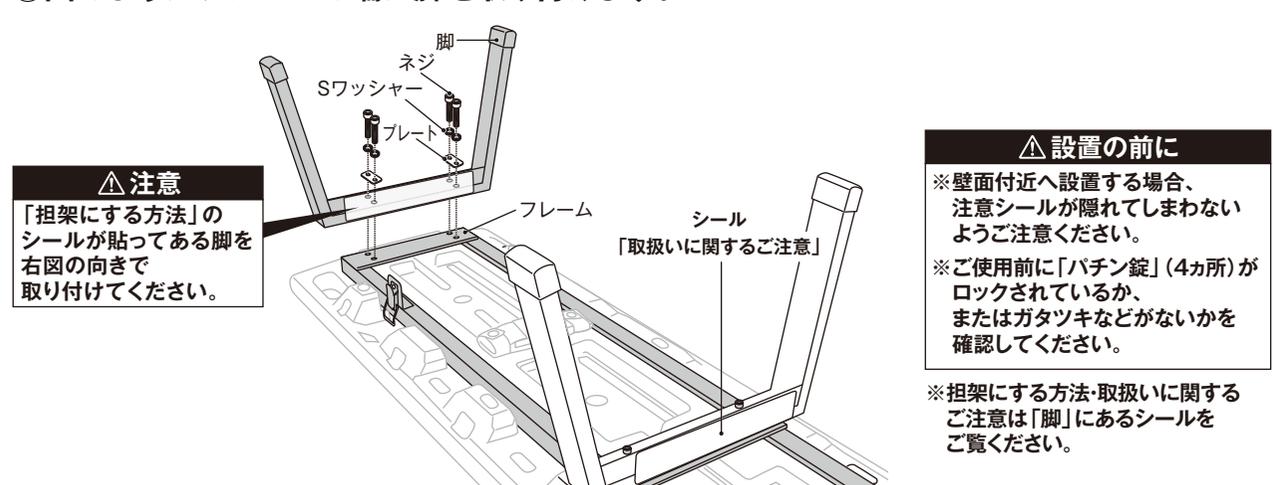

## 警告

取扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

## 注意

取扱いを誤った場合、障害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。

## 保守・点検

ご利用前には安全点検を行ってください。また、1か月に1回は記載の項目を点検してください。

- 火気に近づけないでください。
- 本製品の分解・改造は絶対にしないでください。ケガや故障・破損の原因になります。
- 傾斜地や凸凹・段差のある場所では使用しないでください。
- ベンチ時・担架時ともに不安定な状態となり大変危険です。
- ベンチ時・担架時ともに製品の上に立ち上がり、飛び跳ねたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 要救助者の乗せ替えおよび搬送は必ず4人以上で行ってください。
- 指をつめる恐れがありますので、組み立ておよびご使用の際は、特にご注意ください。
- 必ず管理者のいる場所に設置してください。
- 設置する際は、通行の妨げにならないようご注意ください。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。
- 湿気の多いところや雨風の当たる所には設置しないでください。サビなどの原因となります。
- 搬送時は、要救助者を座面(裏)のベルトで固定させてください。
- 搬送時は、本製品が常に水平の状態でご使用ください。
- 複数の要救助者を乗せないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- 要救助者に負担がかかると思われる場合は、すぐに使用を中止してください。
- 乗せ替え・搬送時に足元の注意を怠るとケガや事故の恐れがあります。
- 緊急時の要救助者の搬送以外では担架として使用しないでください。
- 製品を移動する際は引きずらないでください。また、移動・設置の際に、衝撃を与えないでください。製品が破損する恐れがあります。
- 担架として使用する前に必ず部品の損傷などを点検し異常のないことをご確認ください。
- 異常が見つかった場合は使用を中止し、販売店にて修理点検を行ってください。使用しない時は室内で保管してください。
- サビついていませんか？  
脚にサビなどが発生している場合、製品の強度や耐久性が低下しています。そのままご使用になりますと製品の破損やケガの恐れがあります。
- 脚はしっかりと固定されていますか？  
ネジのゆるみはケガの原因となります。ネジをしっかりと締めてください。
- 座面の損傷やベルトの劣化などはありますか？  
座面の損傷やベルトの劣化は、ベンチ時・担架時ともにケガの原因になりますので、使用を中止しお買い上げの販売店までご連絡ください。
- 洗浄の際は水または、中性洗剤をご使用ください。  
中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。たわし、磨き粉および硬いブラシなどは使用しないでください。またサビなどの原因となりますので、洗浄後は水分をよく拭き取ってください。


## 廃棄される場合

廃棄の際は、専門機関に問い合わせるなど、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。


品質表示	
材 質	座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
サ イ ズ	ベンチ時:約W1780×D460×H380mm、担架時サイズ:約W1780×D430×H81mm
ベルト長さ	約1460mm(バックル部の端から端まで)
重 量	ベンチ時:約22.5kg、担架時:約7.5kg
耐荷重(目安)	担架時:約100kg

MADE IN CHINA

③ 図のように、もう一方の端に脚(シールなし)を取り付けます。

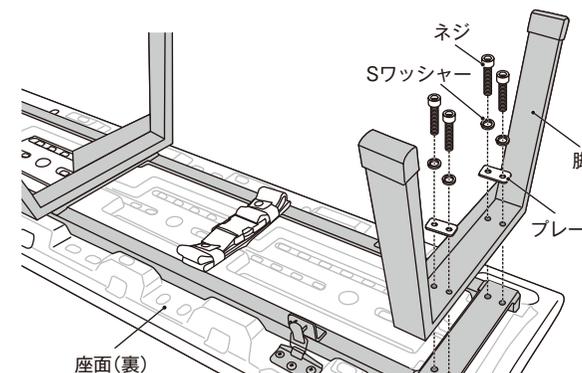

④ 付属の「レンチ」を使い、「脚」と「フレーム」をそれぞれしっかり固定し、表に返したら完成です。

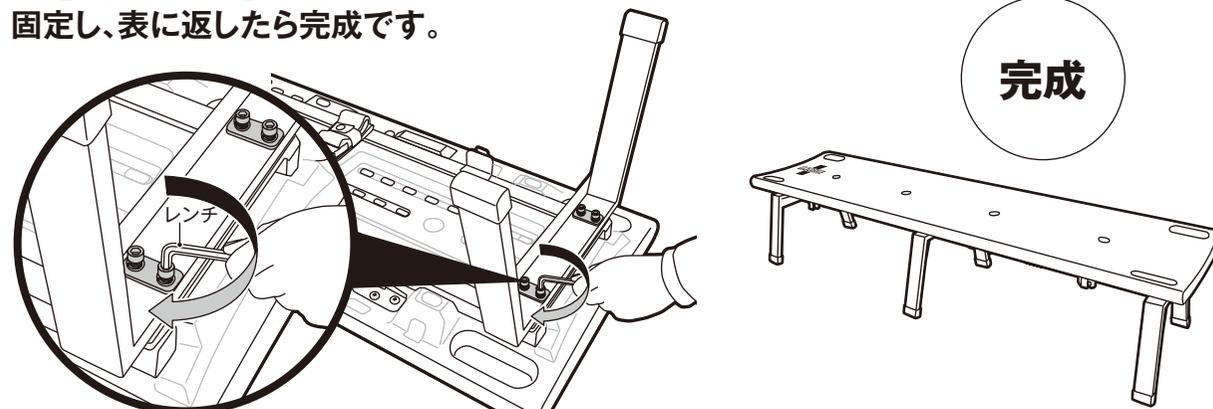

TERAMOTO 株式会社 テラモト

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323  
東京本社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1丁目8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658  
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371  
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552  
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565  
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

お客様相談室 TEL 0120-581-298  
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)  
ホームページアドレス <https://www.teramoto.co.jp/>

