

ピタットクッション 製品説明書

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本製品をご使用前に、必ず「使用上の注意」をお読みいただき、本製品を廃棄されるまで、大切に保管下さい。

品名 ピタットクッション PT-CS 介護椅子用
ピタットクッション PT-CS -KU 車椅子用

色:グリーン・ピンク・ベージュ

材質 表面張地 日本製合成皮革張り
クッション ウレタンフォーム
芯材 合板

表面張地機能 : 防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・耐移行・難燃

製品サイズ	W	D	H	厚み	重量	適用サイズ ひじ掛け間内寸
介護椅子用	470	470	440	60	1.5kg	450～500mm
車椅子用	400	460	440	40	1.0kg	370～420mm

※ワイドタイプの車椅子の場合は「介護椅子用」の方がフィットすることがございます。

ご使用法の説明

1) 肘付きの椅子に下図のように置いてご使用いただけます。

置くだけで簡単にセット完了、面倒な細かな調整がなく、どなたでも簡単にセットできます。

2) 本製品は裏表両方面でご使用いただけます。

リバーシブル仕様なので使いやすく一般的な介護イスにピッタリフィットする汎用性の高いクッションです。

3) 背あてを座面としてご使用いただくことも可能です。

向きを変えて置くことでホールド性の高い座布団としてもご利用でき、座面高を60mm上げることができます。

4) 国産レザー張りなので汚れが付きにくく、拭き取りも簡単です。

アルコールや次亜塩素酸による拭き取りにも強く、張地が硬化しにくいのが特徴です。



通常使用



座布団使用

「ご使用上の注意」

* 著しい汚れを落とす場合は、必ず薄めた中性洗剤をご使用ください。シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。

* 直射日光を避けるようにしてご使用、保存してください。

「製品保証期間」

ご購入から1年間

「ご使用上の注意」をお守りいただいた上で不具合発生の場合に限ります。

〔販売元〕



株式会社オフィス・ラボ

〒791-1106 愛媛県松山市今在家 4-9-32

TEL 089-958-2483 FAX 089-958-2109

<http://officelabo.co.jp>