はね上げ式手すり

ロック付

樹脂被覆タイプ



各種施設用可動式手すり

KF-471EH70JU/WA

¥158,000

■ 上記品番は福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に 準拠しています。

寸法:下図(L=700)

カラー:標準色(WA) 注文色 注2週 (KE、LA1)


材質:〈手すり(被覆材)〉エラストマー 〈手すり(芯材)〉ステンレス 〈固定プレート〉ステンレス(鏡面)

KF-471EH60JU 55

¥156,000

■ 上記品番は福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に 準拠しています。

寸法:下図(L=600) カラー/材質は同上

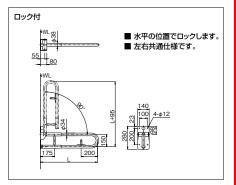

ロックなし 樹脂被覆タイプ



KF-481EH70J/WA

¥117,000



KF-481EH70J/LA1 注2週



KF-481EH70J/KE 注2週

¥117,000

■ 上記品番は福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に 進拠しています。

寸法:右図(L=700)

カラー:標準色(WA)

注文色 洋2週 (KE、LA1)

材質:〈手すり(被覆材)〉エラストマー 〈手すり(芯材)〉ステンレス 〈固定プレート〉ステンレス(鏡面)

KF-481EH60J

¥115.000

■ 上記品番は福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に

寸法:右図(L=600) カラー/材質は同上

ロックなし・紙巻器付 樹脂被覆タイプ



KF-481EHP70J/WA

¥126,000


■ 上記品番は福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に 準拠しています


寸法:下図(L=700)

カラー:標準色(WA) 注文色 注2週 (KE、LA1)

材質:〈手すり(被覆材)〉エラストマー 〈手すり(芯材)〉ステンレス 〈固定プレート〉ステンレス(鏡面)

〈紙巻器〉ステンレス(ヘアライン)

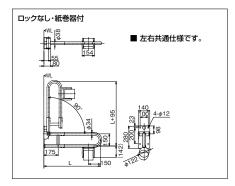

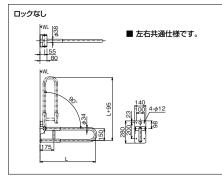

- 建築構造に合った固定金具を使った施工方法により、ガタつかないよう強固に取り付けてください。 外れてケガをする恐れがあります。 P.385「建築構造別取付方法事例 / 現場調達部材」を参照。
- 耐荷重は、垂直荷重1500N、水平荷重800Nです。それ以上の荷重を加えると、外れてケガをする恐れがあります。 手すり以外の用途に使用しないでください。 破損したりケガをする恐れがあります。

▲警告

- 可動式手すりを操作する時は、ゆっくりと操作してください。はね返ってケガをする恐れがあります。
- 可動式手すりを操作する際、可動部に手を置かないようにしてください。手を挟んでケガをする恐れがあります。
 可動式手すりは、屋外や浴室および湿気の多い場所への設置は避けてください。 故障し可動しなくなる恐れがあります。
 はね上げている時や途中にもたれかかったり、体重をかけたりしないでください。 ケガをする恐れがあります。
- 便器前部のもたれかかるような位置に取付けないでください。

- 壁の表面が軟質の場合、手すりに荷重が加わったときに壁が変形する恐れがあります。 構造用合板などで補強してから手すりを取り付けてください。■ 紙巻器付の場合、施工完了後、紙巻器を取り外して使用しないでください。 紙巻器を取り外すと、手すりが勝手にはね上がり、ケガをする恐れがあります(機構部は、手すりと紙巻器を合わせた重さ

ご購入の前に

はね上げ式手すりについて

- 手すりの長さ、紙巻器の有無によって手すりが下りる時間は異なります。
- 同じ仕様の手すりでも手すりが下りる時間にはバラツキがあります。■ 使用環境温度によって手すりが下りる時間は異なります。

施工について

■ ロータンク式密結形便器に可動式手すりをセットする場合は、タンクの給水と反対側にしてください。

手配について

- 当社の各種施設用手すりは、手すり本体と床(壁)に固定する金具が別々の品番になっています。ご注文の際には、手すり本体と施工方法に合った当社固定金具を同 時にご注文ください。なお、現場のレイアウトに合わせた特注品も承っていますのでご相談ください。
- 樹脂被覆タイプのうち、KE(ナチュラルウッド)の木目・色調は製品によりバラツキがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱いについて

- 異音、ガタツキ、破損などの異常を発見した場合は、ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。
- 固定金具・取付方法に関する情報はP.382~389参照。

カラーバリエーション・色品番 品番末尾に/と色品番をつけご発注ください。



LA1 注2週 (カラーズレッド)