

PURE AQUA NEXT

加硫促進剤フリーで
手にやさしい

一般医療機器

食品衛生法
適合
厚生省告示第370号



ブルー 200 枚入

一般医療機器 届出番号 21B3X10008000015

軽さの中に、強さとしなやかさ

耐久性と柔軟性を両立したニトリルグローブ

**軽量 × 高強度**

軽くても強く、
優れた性能と耐久性で
使いやすさを実現

**優れたフィット性と柔軟性**

耐久性と快適性を兼ね備え
手にしっかりフィットし
作業効率をサポート

**加硫促進剤フリー**

アレルギーリスクを低減し
手にやさしい

優れた伸縮性で、より快適に

本製品は、通常のニトリル手袋に比べ
より優れた伸び性能を提供
柔軟性と強度を兼ね備えたニトリル
グローブです



アルコールにも強い耐久性

本製品は、同じ厚みの通常ニトリル手
袋と比較した場合、低濃度アルコール
に対して優れた耐久性があります



商品規格

品番	商品名	カラー	サイズ	ケース入数	JAN コード	ITF コード
M011	ニトリルグローブ ピュアアクア Next 200 枚入	ブルー	XS	10 箱	4906554176108	14906554176105
			S		4906554176115	14906554176112
			M		4906554176122	14906554176129
			L		4906554176139	14906554176136

食品衛生法適合 (昭和 34 年厚生省告示第 370 号)

素材: ニトリルゴム / 製造国: マレーシア

水密性
(ピンホール試験)
ASTM D5151

ピンホールの有無を判定します。
AQL(合格品質水準)の数値が低いほど
厳しい基準となります。

適合 **1.5 AQL**
グローブのピンホール試験を
高水準の数値で試験しております。

バリア性
(薬剤耐性・薬品耐性)
ASTM D6978

医療現場で使用する薬剤および薬品がグローブ
に浸透しないかを試験し、防護性能を確認します。

12種類の薬剤・**4種類**の薬品への
耐性試験済です。

抗がん剤適合性ガイド

薬剤リスト		浸透耐性時間
代謝拮抗剤	フルオロウラシル (50.0mg/ml)	240分まで浸透せず
	メトトレキサート (25.0mg/ml)	
抗癌性抗生物質	マイトマイシン C(0.5mg/ml)	
アルキル化剤	シクロフォスファミド (20.0mg/ml)	
	ダカルバシン (10.0mg/ml)	11.1 分
	カルムスチン (3.3mg/ml)	40.1 分
	チオテパ (10.0mg/ml)	
白金製剤	シスプラチン (1.0mg/ml)	240分まで浸透せず
微小管阻害剤	バクリタキセル (6.0mg/ml)	
	ピンクリスチン硫酸塩 (1.0mg/ml)	
トポイソメラーゼ阻害剤	ドキソルビシン塩酸塩 (20.0mg/ml)	
	エトポシド (20.0mg/ml)	

(試験方法：ASTM D6978)

※本ガイドは実験室環境での試験によるものですので、個々作業や使用条件によっては適合性が異なる場合があることをご留意いただき、手袋が使用に耐えるかどうかご使用の上、ご判断ください。

耐透過性試験ガイド

化学物質名	CAS番号	劣化率	Class
n-ヘプタン	142-82-5	43.1%	3
水酸化ナトリウム 40%	1310-73-2	-3.7%	6
ホルムアルデヒド 37%	50-00-0	47.5%	5
過酸化水素 30%	7722-84-1	30.4%	1

平均標準破過検出時間	Class
>480分	6
>240分	5
>120分	4
>60分	3
>30分	2
>10分	1


※本ガイドはアメリカ材料試験協会規定の「ASTM D6978 医療用グローブの化学療法薬剤の透過に対する抵抗性」の評価基準に準拠した試験方法で、同等品にて実施しております。

※本ガイドは実験室環境での試験結果であり、保証するものではありません。


個々の作業環境や使用条件によっては耐透過性能が異なる場合があることをご留意いただき手袋が使用に耐えるかどうか、目安としてご利用ください。

着脱手順

着け方

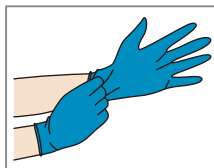


①親指の位置を確認し、手首の部分をつかんで装着する

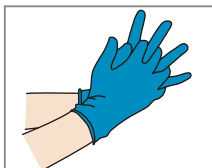


②指先部分をフィットさせる


外し方

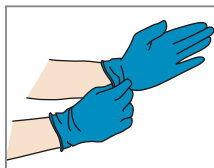


①片方の手袋の袖口をつかむ

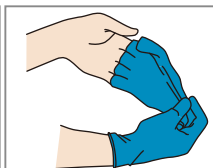


②表面が内側になるように裏返ししながら外す

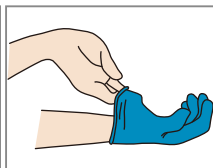

③手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む

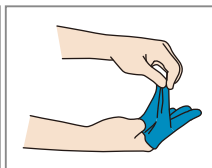

④裏返ししながら外す

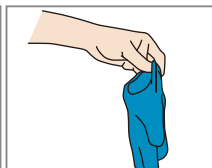

⑤すぐに破棄し、手指消毒を行う



川西工業株式会社

〒503-0011 岐阜県大垣市曾根町 2-195
TEL (0584)77-7997 FAX (0584)77-7996
<http://www.kawanishi-kk.co.jp>

川西工業HP

