

GLOVE MANIA

検査検診用ニトリルグローブ ダリア

#2069 Nitrile Examination Gloves Dahlia

一般医療機器 届出番号 21B3X10008000002

パウダー
フリー

ラテックス
フリー

食品衛生法
適合

250
枚入



バイオマスエネルギーとは…

動植物に由来する有機性の資源のバイオマスを原料として得られるエネルギーのこと。
弊社の販売している天然ゴム手袋の製造工場では、林産資源を利用しています。

どんなメリットがあるのか

- ・木を余すことなく原料、エネルギーとして利用する為、環境に優しい。
- ・ウッドチップでのエネルギーはLPG（液化石油ガス）、石炭でのエネルギーと比べ温室効果ガスの排出量が少ない。

この製品はバイオマスエネルギーを 100%利用して生産された製品です。
環境に優しいものづくりを通して、社会貢献を目指しております。

生産の流れ

植林



木から樹液を
採取

工場

加工し、
天然ゴム手袋を生産



手袋は微生物の
作用により分解
される

樹液を採取し終わった
木をウッドチップに

木を余すことなく
全て利用する



燃料として使用した
ウッドチップは
レンガに加工



レンガは無償で
町に提供される


商品規格

品番	商品名	カラー	サイズ	入数	JANコード	ITFコード
#2069	検査検診用ニトリルグローブ ダリア	パープル	XS	250枚×8箱	4906554-165928	14906554-165925
			S		4906554-165935	14906554-165932
			M		4906554-165942	14906554-165949
			L		4906554-165959	14906554-165956

◆素材：ニトリルゴム ◆生産国：タイ


脱着手順

【手袋】【着け方】

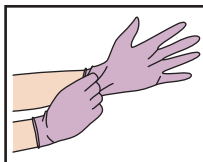


①親指の位置を確認し、手首の部分をつかんで装着する


【手袋】【外し方】

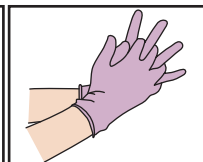


②指先部分をフィットさせる

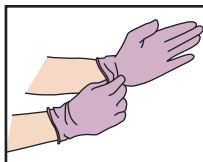


①片方の手袋の袖口をつかむ

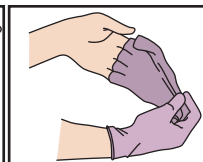


②表面が内側になるように裏返ししながら外す

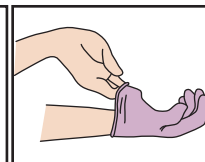

③手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む

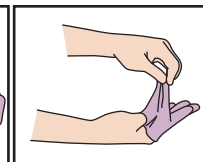

④裏返ししながら外す

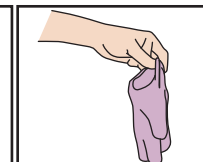

⑤すぐに破棄し、手指消毒を行う

川西工業株式会社

商品特長

水密性
(ピンホール試験)
ASTM D5151

ピンホールの有無を判定します。
AQL(合格品質水準) の数値が
低いほど厳しい基準となります。

適合 **1.0 AQL**
グローブのピンホール試験を
高水準の数値で試験しております。

バリア性
(薬剤耐性・薬品耐性)
ASTM D6978-05
EN374-3

医療現場で使用する薬剤および
薬品がグローブに浸透しないかを
試験し防護性能を確認します。

55種類 の薬剤と **15 種類** の薬品
への耐性試験済みです。

取出し口の工夫

- ① 指先に触れず手首から1枚ずつ取り出すことで衛生的に使用可能です。
- ② 中身が少なくなってきたら、別の取り出し口から取り出すことが可能です。



◆ 取出し口が2カ所あります。



薬剤および薬品適合ガイド (第三者機関による試験結果)

※本ガイドは実験室環境での試験によるものですので、個々作業や使用条件によっては適合性が異なる場合があることをご留意いただき、手袋が使用に耐えるどうかご使用の上、ご判断ください。

薬剤リスト		浸透耐性時間	薬品リスト		浸透耐性時間
代謝拮抗剤	アザシチジン(ビダーザ)(25.0mg/ml)	240分まで浸透せず	チオグリコール酸	480分まで浸透せず	
	シタラビン(100mg/ml)		アンモニウム60%		
	カペシタビン(26.0mg/ml)		塩化ベンザルコニウム50%		
	クラドリビン(1.0mg/ml)		臭化エチジウム1.5%		
	ゲムシタビン(38.0mg/ml)		エチレングリコール		
	デンタビン(5.0mg/ml)		ホルムアルデヒド15%		
	フルオロウラシル(50.0mg/ml)		グルタルアルデヒド4%		
	フルダラビン(25.0mg/ml)		塩酸10%		
	ベメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物(25.0mg/ml)		過酸化水素30%		
ラルチトレキセド(0.5mg/ml)	ヒドロキノン5%				
メトトレキサート(25.0mg/ml)	硝酸10%				
アクチノマイシンD(0.5mg/ml)	ポビドンヨード10%				
イダルビシン塩酸塩(1.0mg/ml)	水酸化ナトリウム40%				
エビルビシン塩酸塩(2.0mg/ml)	過酸化ナトリウム10%				
ダウノルビシン塩酸塩(5.0mg/ml)	硝酸47%				
ドキソルビシン塩酸塩(2.0mg/ml)					
プレオマイシン(15.0mg/ml)					
マイトマイシンC(0.5mg/ml)					
ミトキサントロン(2.0mg/ml)					
抗癌性抗生物質	イホスファミド(50.0mg/ml)				
	メクロレタミン(1.0mg/ml)				
	シクロフォスファミド(20.0mg/ml)				
	ダカルバシン(10.0mg/ml)				
	ブスルファン(6.0mg/ml)				
	ベンダムスチン塩酸塩(5.0mg/ml)				
	メルファラン(5.0mg/ml)				
	チオテパ(10.0mg/ml)				
	カルムスチン(3.3mg/ml)				
アルキル化剤	オキサリプラチン(5.0mg/ml)	22.8分			
	カルボプラチン(10.0mg/ml)	22.8分			
	シスプラチン(1.0mg/ml)				
	ドセタキセル(10mg/ml)	240分まで浸透せず			
	パクリタキセル(6.0mg/ml)				
	ビノレルビン(10.0mg/ml)				
	ビンクリスチン硫酸塩(1.0mg/ml)				
	ビンプラスチン硫酸塩(1.0mg/ml)				
	イリノテカン塩酸塩(20.0mg/ml)				
エトポシド(20.0mg/ml)					
トボテカン(ノギテカン)塩酸塩(1.0mg/ml)					
トリセノックス(1.0mg/ml)					
トポイソメラーゼ阻害剤	カルフィルゾミブ(2.0mg/ml)				
	セツキシマブ(アービタックス)(2.0mg/ml)				
	テムシロリムス(25.0mg/ml)				
	ボルテゾミブ(ベルケイド)(1.0mg/ml)				
	リツキシマブ(10.0mg/ml)				
	フルベストラント(50.0mg/ml)				
	リユープロレリン酢酸塩(5.0mg/ml)				
	ガンシクロビル(10.0mg/ml)				
	ジドブジン(レトロビル)(10.0mg/ml)				
その他抗がん剤	ゾレドロン酸(1.0mg/25ml)				
	トリクロサン(3.0mg/ml)				
	クロロキン(50.0mg/ml)				
	シクロスボリンA(100mg/ml)				
	メスナ(100.0mg/ml)				
	プロボフォー(10.0mg/ml)				
分子標的薬					
ホルモン製剤					
その他薬剤					

(試験方法: EN374-3)



(試験方法: ASTM D6978-05)



川西工業株式会社

〒503-0011 岐阜県大垣市曽根町 2-195
TEL (0584)77-7997 FAX (0584)77-7996
http://www.kawanishi-kk.co.jp

川西工業HP

