

ワンタッチ顎バンド

ソフラ® あごバンデージ I



日本製
MADE IN JAPAN



▲商品詳細
はこちら

あご関節の脱臼予防や施術後に
あごを気持ちよく固定

- 面ファスナーでしっかり固定
固定力の微調整が可能
- 綿が主体のやさしい素材
- 一体型3点留めでズレにくい形状



(肌側)
縫い目を外側にし
肌への負担を軽減

コンパクトなパッケージ
・取扱説明書同封



定価：4,950 円（税込）4,500 円（税抜）

商品番号	規格	販売単位	JAN CODE	ケース単位
007392	ベージュ S	1枚	4958995073928	10枚
007393	ベージュ M	1枚	4958995073935	10枚
007394	ベージュ L	1枚	4958995073942	10枚
007402	ピンク S	1枚	4958995074024	10枚
007403	ピンク M	1枚	4958995074031	10枚
007404	ピンク L	1枚	4958995074048	10枚


素 材

綿・ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン


サイズの選び方

サイズ	首廻り	顔廻り
S	35cm	60cm～65cm
M	37.5cm	65cm～70cm
L	42cm	70cm～75cm

※値がぎりぎりの場合は1サイズ上をおすすめします

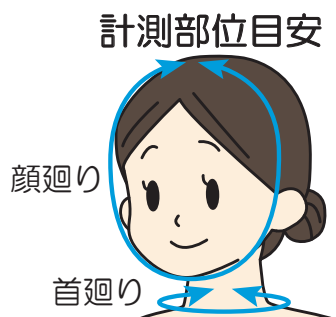


装着方法

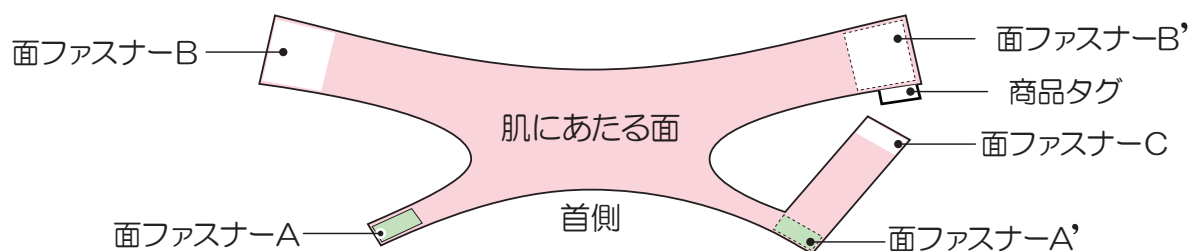


▲商品詳細
はこちら

1

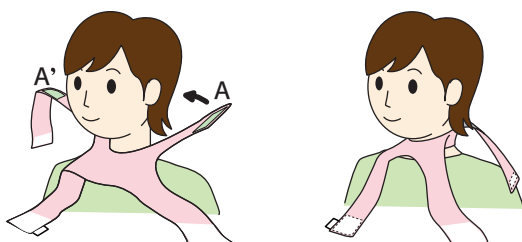


面ファスナーAとA'の両端を持ち、
首の後ろにまわし、首の後ろでとめます。
(左手側のAが上になります)

2

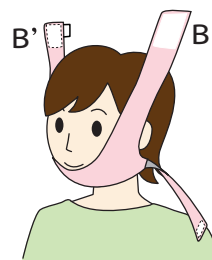


面ファスナーBとB'の両端を持ち上げ、
あごにフィットするまで引き上げ、
頭の上でとめます。
(左手側のBが上になります)

3

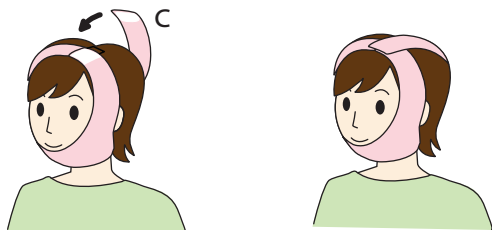

面ファスナーCを持ち上げ、
面ファスナーBとB'の上でとめれば
装着完了です。

*

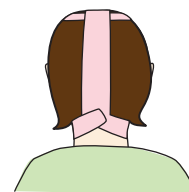

*後ろから見た図
固定力を微調整して
ください。



株式会社 竹虎®

<https://www.taketora-web.com/>

【メディカル事業部】

東日本 〒231-0011 神奈川県横浜市中区太田町2-23 横浜メディアビジネスセンター 8F
TEL. 045 (680) 0308 (代) FAX. 045 (680) 0312
西日本 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-35 江坂南口第二ビル 5F
TEL. 06 (6386) 7217 (代) FAX. 06 (7175) 7101

取扱店