



使用場面

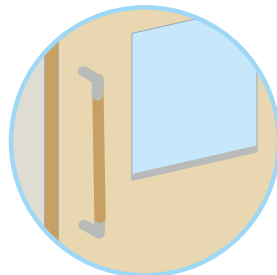

ドアノブ

ベッド柵や
オーバーテーブル

床頭台

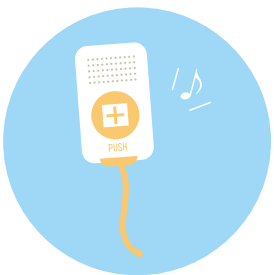

ナースコール




手すり



キーボード・マウス



電話

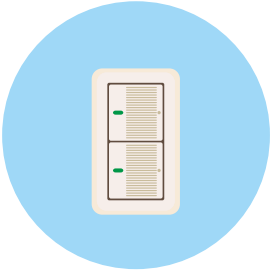

スイッチ



車椅子のグリップ部分



テーブル・イス

注意事項

使えないもの

- 銅・真ちゅう・亜鉛・錫の金属製品
- 水がしみこむ白木・壁材・家具類
- ポリカーボネート
- 革製品
- 液晶・プラズマディスプレイの画面
- アルミニウム、木材、合皮、ABSなどは目立たない部分で影響がないことを確認してから使用する。

使用上の注意

- 取り扱い時には、手袋を使う。
- 用途外に使わない。
- 手、顔など身体や食器・食品及び食品に直接触れる機器・器具等には使用しない。
- 水に溶けないので、トイレに流さない。
- 効果が落ちるので、塩素系や酸素系漂白剤との併用はしない。
- 直射日光を避け、高温の所に置かない。
- 子供の手の届く所に置かない。
- 認知症の方などの誤食や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
- 使用後はシートの乾燥を防ぐため、必ずフタを閉める。
- ★機器などに使用する場合は、機器の取り扱い説明書に従う。
- 機器内部や凹凸のある箇所には使用しない。

目付・梱内容

品名	目付	梱内容	サイズ(mm)・重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
セイフキープEX 本体 80枚 [シートサイズ:140mm×200mm]	80枚入	12個	個 170×107×107 335g	4 901301 434975
			梱 190×451×337 4.4kg	
セイフキープEX つめかえ用 80枚 [シートサイズ:140mm×200mm]	80枚入	24袋	袋 170×83×65 261g	4 901301 434982
			梱 191×540×300 7.0kg	
セイフキープEX ワイドサイズ フタ付きビロー 80枚 [シートサイズ:215mm×200mm]	80枚入	18袋	袋 65×250×110 430g	4 901301 435002
			梱 233×407×340 8.5kg	
セイフキープEX ワイドサイズ つめかえ用 300枚 [シートサイズ:150mm×300mm]	300枚入	6袋	袋 155×195×195 1.6kg	4 901301 434999
			梱 179×616×390 10.5kg	
セイフキープEX ワイドサイズ つめかえ容器	—	4個	個 190×229×229 272g	4 901301 441126
			梱 301×475×245 1.5kg	

※写真以外の画像は、他の印刷物やWEBサイト等での無断使用を禁じます。 ※この販売レポートに記載したデータ等は、当社調査結果にもよるものです。 ※セイフキープは花王の商標です。

お問い合わせ・ご注文は

それ以上を生み出す、清潔提案を。
KaO 花王プロフェッショナル・サービス株式会社
 〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 ☎ 03(5630)9283

Image copyright check. 2023年11月

製品カタログサイトはこちら
<https://pro.kao.com/jp/products/>



セイフキープEX

医療機関・介護施設用

第四級アンモニウム塩配合



本体(80枚)



つめかえ用(80枚)



ワイドサイズ フタ付きビロー(80枚)



ワイドサイズ つめかえ容器



ワイドサイズ つめかえ用(300枚)

これ1枚で、汚れ洗浄、除菌*1・ウイルス除去*1
 施設の環境清掃をサポート!

- 1 複数のウイルス・細菌での検証を実施
- 2 皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とす
- 3 24時間抗菌**効果が持続

*1 すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 *2 すべての菌の増殖を抑制するわけではありません。


KaO 花王プロフェッショナル・サービス

皮脂・血液汚れの洗淨から、 細菌・ウイルス対策まで、1枚で幅広く使える！



複数のウイルス・細菌での検証を実施 日常清掃～細菌・ウイルス対策まで！


ウイルス除去*1効果

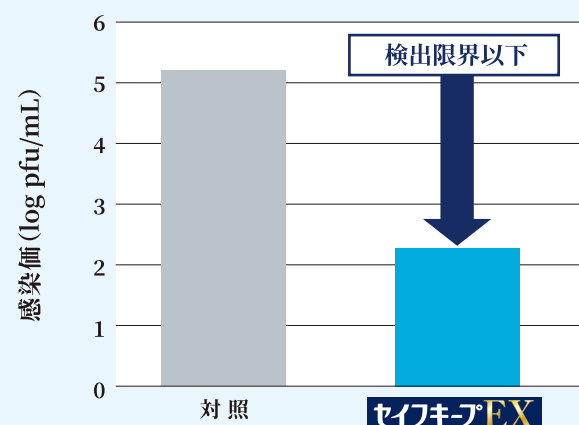

※2022年 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ
試験法：ウェットワイパー類の除菌性能試験
(日本衛生材料工業連合会)に準用

*1 すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。


除菌*1効果

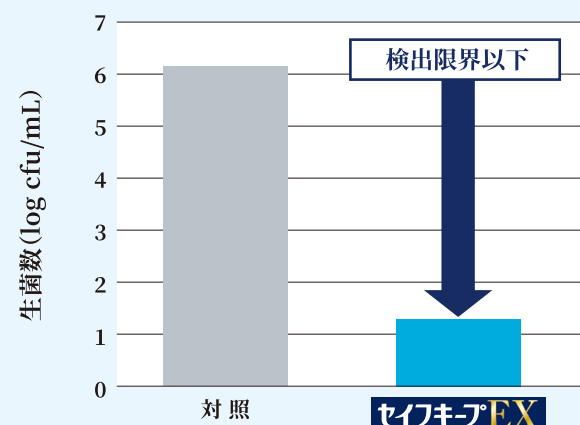

※2022年 一般財団法人 日本繊維製品品質技術センター調べ
試験法：ウェットワイパー類の除菌性能試験
(日本衛生材料工業連合会)を準拠

ふきとり性に優れた、ストライプ柄シート採用 血液汚れにも、高い洗淨性能を発揮！

一般的な柄

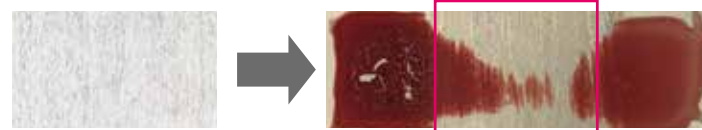


特殊なストライプ柄



評価方法

0.1g血液汚れ(プロタミン入り羊血液)を15mm×50mmの大きさでSUS板に塗布して乾燥後、4つ折りにした清拭シートに400gの荷重をかけながら同じ方向に10回清拭した。

血液汚れに対する洗淨力

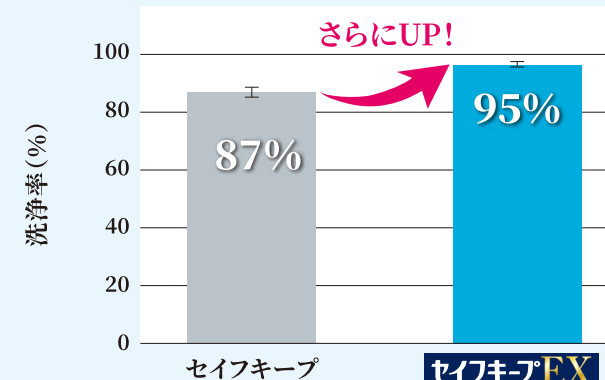


評価方法

血液汚れ(プロタミン入り羊血液)を20μLずつ4点SUS板に塗布して乾燥後、4つ折りにしたシートに200gの荷重をかけながら二往復清拭し、汚れの除去率を重量から算出した。

24時間抗菌*2持続効果 次の清拭まで菌の増殖を抑制

24時間後の菌数

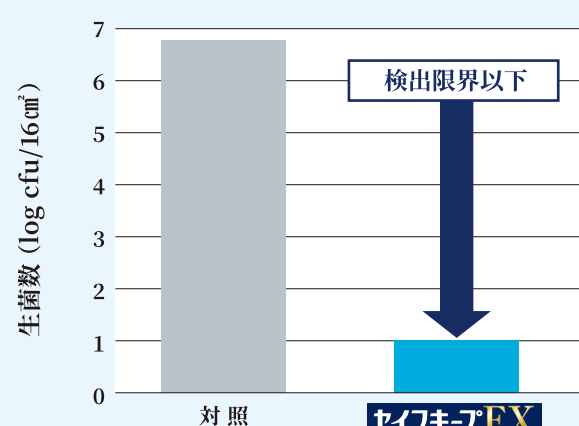

※2022年 花王調べ
試験法：JIS Z 2801 抗菌性試験法に準用
試験法概略：シートで一拭きしたステンレス板に、菌を塗布。
試験開始から24時間後に菌数をカウント。

*2 すべての菌の増殖を抑制するわけではありません。

拭く対象を傷めにくい

プラスチック		金 属	
ポリエチレン	○	ステンレス	○
ポリプロピレン	○	アルミニウム*	○
ポリスチレン	○	アルミニウム* (アルマイト加工)	○
アクリル	○		
塩化ビニル	○		
ナイロン	○		
ABS樹脂*	○		

○…未処理のものと比較して同等


試験法概略

市販の標準試験板を使用して評価を実施

プラスチック：厚さ1mm、幅10mm、長さ70mmの各樹脂製の試験板に清拭シートを応力下24時間接触させ、試験板の外観および屈曲させたときの脆さを評価
金属：試験板をシート絞り液に浸漬し、50℃、10日保存後の状態を評価

※アルミニウム、ABS樹脂は目立たない部分で影響がないことを確認してからご使用ください。
グレードや形状、微細な傷、負荷等の状況により影響が出る場合があります。
●機器などに使用する場合は、機器の取り扱い説明書に従ってください。
機器内部や凹凸のある箇所へのご使用はお控えください。

強度(破れにくさ)

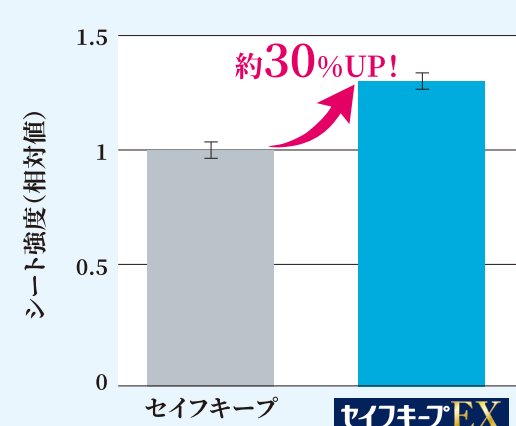

評価方法

100×50mmの清拭シートを用い、変位50mmにおける荷重ピークをシート強度とした。
※セイフキープワイド、セイフキープEXワイドサイズで比較。

1面あたりの清拭可能面積

1枚のシート面積の約28倍*3 清拭可能！

	セイフキープEX 本体	セイフキープEX ワイドサイズ	セイフキープEX ワイドサイズ フタ付きビロー
清拭可能 面積*3	0.8 m ²	1.3 m ²	1.2 m ²
シートサイズ	140mm 200mm 280cm ²	150mm 300mm 450cm ²	215mm 200mm 430cm ²

*3 材質や汚れの状況により前後します。