

M008

zerotica Nitlean



手首から片手でサッと、
無駄なく清潔！



ホワイト
125枚入

食品衛生法
適合
厚生省告示第370号

ポップアップ式を採用！

- 手首部分から1枚ずつ取り出せる
- 交差汚染の防止
- 手袋の無駄な取り出しを軽減



コンパクト梱包

- 狭いスペースを有効活用
- 全自動交互包装で衛生的




商品規格

品番	商品名	カラー	サイズ	入数	JAN コード	ITF コード
M008	ゼロティカ ニトリン 125 枚入	ホワイト	XS	16 袋	4906554173923	14906554173920
			S		4906554173930	14906554173937
			M		4906554173947	14906554173944
			L		4906554173954	14906554173951


Zerotica シリーズと箱包装との比較

① ゴミの廃棄量削減

・M007(1袋/10g)と箱型(1箱/60g)を比較

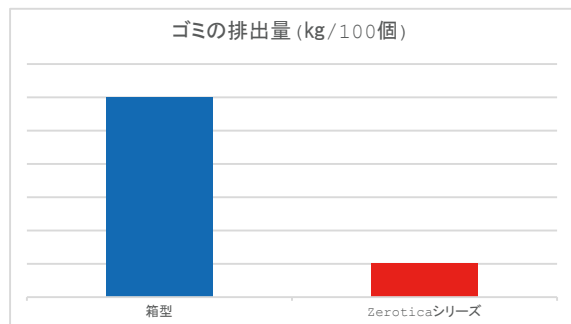

●Zerotica シリーズは
約85% ゴミを削減!
*自社調べ

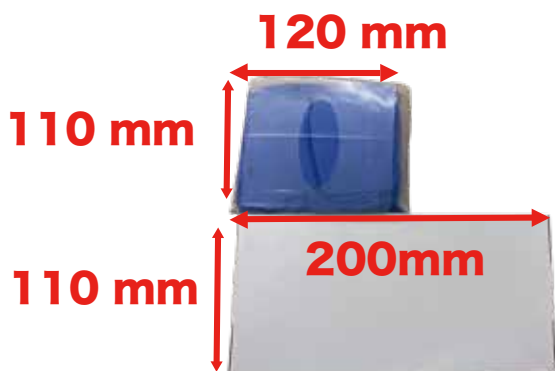

●商品サイズも箱タイプより
約43% 縮小可能!
*自社調べ

② 配送回数の削減 (商業バンで50ケース運んだ場合)

箱タイプ Zeroticaシリーズ




**半分のスペースで
配送可能!!**

*自社調べ


配送1回で手袋以外の荷物も運べるように!!

脱着手順

着け方

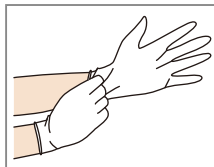


①親指の位置を確認し、手首の部分をつかんで装着する

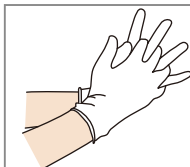


②指先部分をフィットさせる


外し方

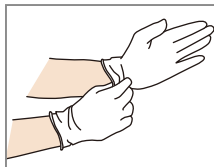


①片方の手袋の袖口をつかむ

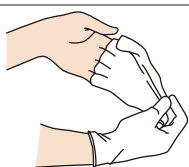


②表面が内側になるように裏返ししながら外す

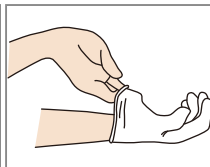

③手袋を外した手を反対の手袋の袖口に差し込む

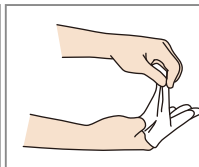

④裏返ししながら外す

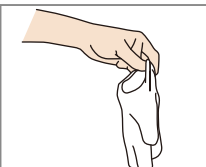

⑤すぐに破棄し、手指消毒を行う



川西工業株式会社

〒503-0011 岐阜県大垣市曾根町 2-195
TEL (0584)77-7997 FAX (0584)77-7996
<http://www.kawanishi-kk.co.jp>

川西工業HP

