

WAIST BELT 12

ギアホールド

腰への負担を軽減
正しい位置に固定



美しい姿勢へ



幅 21cm のプレートと 12 個のギアによる優れたホールド力で腰への負担を軽減し、腰をサポート！

使用方法



- 調整ストラップを外し、ストリングを緩め、ストリングが背骨のラインに来るように合わせてください。(必ずストリングを緩めてください)
- 骨盤にかかる位置に合わせ、体の正面で面ファスナーでとめてください。(交差するまでしっかりと体に巻きつけてください)
- 調整ストラップを左右水平に引きストリングを締め、調整ストラップの面ファスナーでとめてください。
- ゆるみやズレが無いか確認し、過度に締めすぎないように注意してください。(その都度ストラップで調整してください)

サイズ選び

シャツを着た状態でウエスト回り・骨盤回りのどちらか大きいほうのサイズにあてはめてください。厚めの服の上から着用する場合は少し大きめがおすすめです。

サイズ (cm)	
S	65 - 80
M	80 - 95
L	90 - 105
LL	100 - 115

洗濯方法

ベルトを畳んで洗濯ネットに入れソフト洗いで洗濯し、室内陰干ししてください。染料の特性上、汗や水分などで濡れた場合、また強くこすられた場合、摩擦により衣服などに色移りすることがありますのでご注意ください。

取扱表示



ご使用の注意

- ※本製品は医療用品ではありません。
- ※本体ベルトや、調整ストラップを締めすぎないでください。
- ※ご使用前に必ず、製品箱に記載されている使用方法等をよく読み、正しく装着してください。
- ※少しでも違和感や不快感などがあれば、緩めたり使用を中断してください。(傷・痛み・しびれ・腫れ・湿疹・かぶれ等の異常)
- ※滑りやすい生地や肌着等の上に本製品を装着している場合や、腰を曲げる動作が多い場合は、本製品がズレやすい原因となります。
- ※面ファスナーにはかたい材質を使用しています。まれに指や肌を傷つける場合がありますのでご注意ください。
- ※面ファスナーが衣類につかないように装着してください。糸のほつれや伝線の原因となります。
- ※小さなお子様・妊娠中の方・アレルギー体質の方・皮膚が敏感な方のご使用はお控えください。
- ※本製品の加工・改造・修理を行わないでください。
- ※腰部以外の部位に使用しないでください。
- ※就寝時の使用や長時間の圧迫を避けて使用してください。

商品名 : ウエストベルト ギアホールド 12
材質 : ナイロン・ポリエステル・PP・PVC
カラー : ブラック



ウイキャン株式会社
WEB : <https://www.wecan-japan.com/>
MADE IN CHINA

WEB

