

# Ergo-Step™踏み台 消毒方法

- ・ご使用後の踏み台の洗浄方法は主に2通りあります。
  - ①カート洗浄機を使用
  - ②手動で洗浄・消毒
- ・次に使用する際の感染予防のためにご協力をお願いします。
- ・消毒作業は、必ず手袋を装着して行ってください。

## 【準備するもの】

(A) 酵素系洗浄剤、(B) 70%エタノール、(C) 使い捨て手袋

※注意：(A) と (B) を混ぜないでください。有毒なガスが発生し危険です。

## ①カート洗浄機を使用する場合

貴院の Protokol に従って洗浄・消毒をお願いします。

※注意：洗浄および乾燥のサイクルは 140°F (60°C) を超えないようにしてください。  
界面活性剤入りの消毒剤は踏み台の劣化の原因になるため使用しないでください。

## ②手動で洗浄・消毒する場合

### 1. 洗浄手順

- ・踏み台本体の表裏両方を水洗いし、拭き取り乾燥させます。
- ・(A) 酵素系洗浄剤を使用して表裏側面の汚れを洗浄します。  
洗浄後は水拭きと乾拭きを行い、完全に乾燥させます。



### 2. 消毒方法（材質に応じて選択）

- ・(B) 70%エタノール（原液で OK）を踏み台の表裏側面すべてにスプレーし、1分間放置します。
- ・水拭きと乾拭きを行い、完全に乾燥させます。



※注意：界面活性剤入りの消毒剤（例：クリーンキーパー、セーフキープなど）は、踏み台の劣化の原因になるため使用しないでください。