


Mueller フェイスガード 84457 〈装着の手順〉

注意

一度装着すると
剥がれません

- それぞれのパッド(3mm・6mm)を仮装着し、感覚を確かめてください。
- 本装着をする前に、必ず仮装着(のり面を剥がさずに)を行ってください。
- 鼻の高さの感覚を確認します。(運動中に鼻部の高さに違和感を感じないか)
- 左右上下の視界を確認します。

仮装着スタート

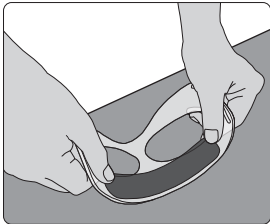

- ① パッドのシールを剥がさずに、シールドに仮装着してください。



- ② パッドが仮装着の状態、額・ほお骨に装着します。

左右上下の視界を確認します。




- ③ 4か所から圧を加え、違和感がないか確認します。

鼻の高さの感覚を確認します。




- ④ ほおの感触も確かめます。

本装着スタート

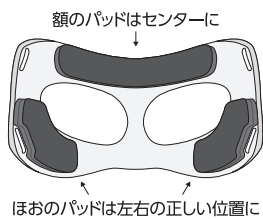

- ⑤ パッドのシールを剥がし、シールドの正しい位置に装着します。

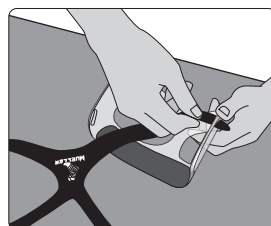

- ⑥ 4か所にストラップを挿入します。



- ⑦ パッドの位置を合わせます。



- ⑧ ストラップを引いて、ほおの強度を調整します。



- ⑨ ストラップを引いて、額の強度を調整します。



- ⑩ 後ろのバンドの位置を調整します。



- ⑪ パッドのあたる感触を再度調整しましょう。



- ⑫ 完了です。

⚠ 使用上の注意

【着用期間】この製品は、鼻骨を骨折・損傷した選手が、二次的な損傷の事故を防止するために着用する製品です。着用期間は、医師、トレーナーと確認しながら使用してください。【形状について】この製品は、より多くの選手の使用を目的とするため、完全なフィット感が得られない場合があります。鼻の形状は高く感じる場合があります。競技中の装着をイメージしながら購入をご判断してください。【お手入れ】この製品は、硬質で柔軟性のあるプラスチック素材で作られています。使用後は、表面を傷つけないように水分を拭きとり、乾燥した場所で保管をするようにしてください。表面を強く擦ると、傷がつき、視界の妨げの原因になります。【試合での使用許可】競技により使用できない場合があります。試合前に地域競技団体審判部にお問い合わせください。【返品・交換について】パッドを製品に貼り装着後の製品の返品・交換はできません。ご注意ください。

ミュージャパン株式会社 輸入総発売元

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル
TEL 045-651-7800 FAX 045-651-7828

www.muellerjapan.com

お問い合わせ先 sportcare@muellerjapan.com