
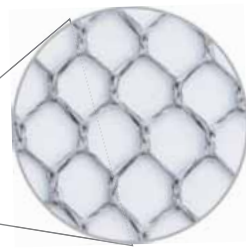


Ag⁺布マスクや不織布マスクにインサート! ウィルス等を除菌、臭いや花粉を抑制! マスク除菌シート

Ag⁺マスク除菌シートはマスク内で息に含まれる水分と銀が反応して銀イオンが発生し、銀イオンがマスク内のウィルスや細菌を除菌・抗菌し、花粉やハウスダスト等のアレル物質を抑制し、雑菌の繁殖を抑えてマスクの気になる臭いも抑えます。布マスクや不織布マスクに入ると快適で安心です。


食器用洗剤で洗うだけで、30回繰り返して使用できます(※使用環境によっては30回以上使用可能)

【使用方法】

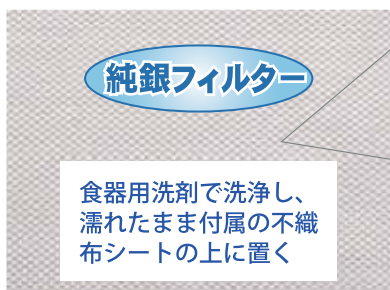


純銀フィルターが熱を放射し
マスク内の温度を下げます!
運動中も呼吸が楽になり、
熱中症対策に最適!


銀イオン Ag⁺ で除菌!

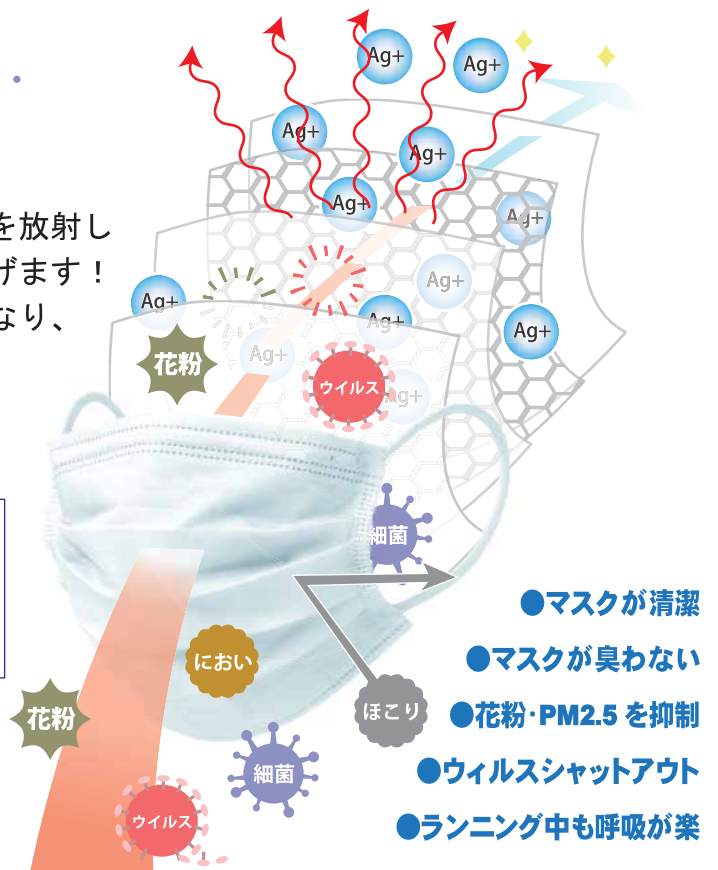


不織布は毎回交換願います。
銀に油分や塩分が付着すると銀イオンが発生しにくくなります。

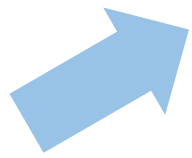

不織布 フィルター 不織布 純銀フィルター 不織布

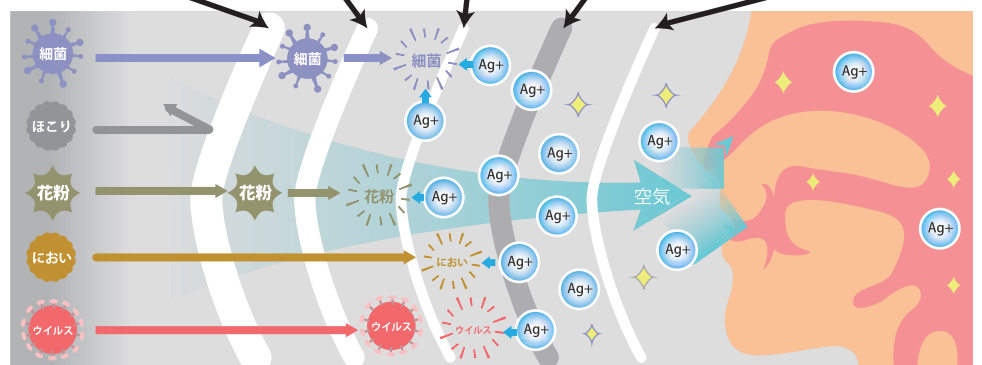

不織布をマスクに固定したい場合は、
市販のサージカルテープがお勧めです

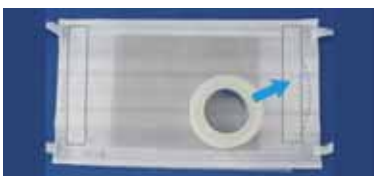

当社開発の「Ag+マスク除菌シート」について

【特 徴】

- 銀の表面積が純銀フィルター面積の約2倍あります。熱を放射するのでマスク内の温度を下げる



- 銀の表面積が大きいので、呼気の水分と反応し、銀イオンがマスク内に多数発生します。
- 銀イオンがマスク内の細菌やウィルス類を除菌します。
- 銀イオンが花粉・PM2.5などのアレル物質を抑制します。
- 一日中マスクをしていても嫌な臭い残りません。
- 30回繰り返して使用できます。不織布は毎日交換し、不織布がなくなると交換時期となります。

【使用上の注意】

- ① 使い始めに純銀メッシュを食器用洗剤で洗って下さい。
- ② 濡れたまま付属の不織布シートの上に置いて下さい。銀と水が反応して銀イオンが発生しやすくなります。
- ③ 使用後または使用前に食器用洗剤で洗浄して下さい。
- ④ 安全性の高い銀を使用していますが、お肌に金属アレルギーが出た場合はご使用をおやめ下さい。
- ⑤ 1週間以上使用しない場合は、食器用洗剤で洗浄し、必ずパッケージの気密袋に封入して保管して下さい。
- ⑥ 誤食を防ぐため幼児の手の届かない場所に保管願います。
- ⑦ 効果期限を守ってご使用下さい。※

※洗濯試験を50回繰り返しても抗菌効果が失われないことを確認していますが、「呼吸」により絶えず銀が呼気や外気と接触してしまうため、呼気や外気に含まれる塩素やイオウ、その他有機物と結合し、銀化合物(塩化銀や硫化銀)となり劣化が早くなります。それらのリスクを考慮した上、弊社では使用期限を30日に設定しております。

Ag マスク除菌シートの価格と仕様

- 用 途: マスク内の除菌・抗菌・消臭
素 材: 純銀メッシュ(ナイロン70%、純銀30%)
不織布シート(ポリプロピレン100%)
寸法・入数: 純銀メッシュ 縦70×横90mm(1枚)
不織布シート 縦90×横130mm(30枚)
効果期限: 30回(不織布シートは毎回交換)
保管方法: パッケージの気密袋に封入して保管

メーカー希望小売価格

／袋 30日分

品番(JANコード)	AGSM7090PP30(4560293816024)
個包装	PP_PE_PET(気密袋)入り
内箱 (入数/サイズ)	12袋入/幅125×高さ215×奥行80mm
外箱 (入数/サイズ)	20内箱入/幅260×高さ450×奥行410mm



●お問い合わせ

製造販売元

製造販売業許可番号
27B3X00308



MEDICAL-AID CO.,LTD.

メディカル・エイド株式会社

〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ 3-1-11
medical-aid Tel:0725-53-3270 Fax:0725-53-5337

<https://www.medical-aid.co.jp/>

各種製品情報、サポート案内などの様々な情報を満載したメディカル・エイドのホームページです。

●メディカル・エイドインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

お問い合わせ先 ☎ 0120-088-804 受付時間: 月～金曜日 9:00～17:00
(土日祝祭日休み)

販売代理店

●ご購入、お取引に関するお問い合わせ