


内容物と役割



応急処置マニュアル

周囲に複数人いる場合は手分けして迅速に進めましょう。

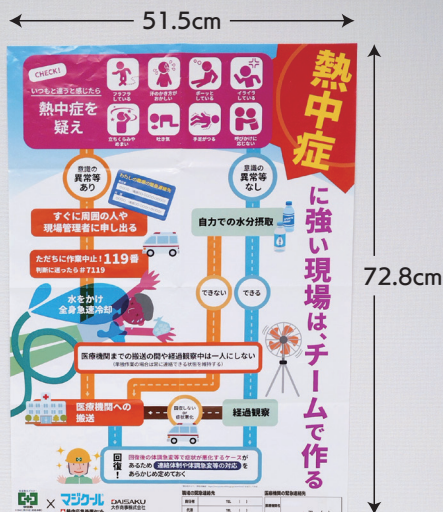

設置例

緊急連絡先記入欄付き

職場の緊急連絡先		医療機関の緊急連絡先	
責任者	TEL ()	医療機関名	TEL ()
代理	TEL ()		


避難

涼しい環境へ移動・避難

付属のシートを敷いて寝かせます。

意識がない(薄い)場合は医療機関に連絡・搬送

自分で動けない・水が飲めない場合も同様です。

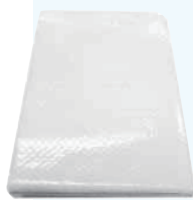

敷きシート



できるだけ早く下記の冷却を開始しながら一刻も早く集中治療のできる医療機関へ搬送することが必要です。


冷却

脱衣

涼しい場所に移動したら、装備しているものや着衣のボタンなど、身体をしめつけるものをできるだけ外して通気を良くしましょう。付属の体温計で体温を測りましょう。




体温計

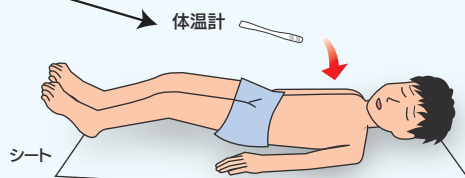


冷却

頭・体・首を冷やす

本製品が入っている袋に水と叩いたひえっぺ(瞬間冷却パック)を入れ、マジクールとフェイスタオルに冷水をふくませます。

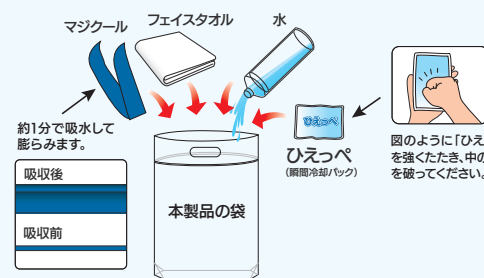

膨らんだマジクールを首に巻き、フェイスタオルで頭部後頭部を冷やします。ひえっぺ、氷(用意できれば)などで首、わきの下、足のもの付け根など大きな血管が通っている場所を冷やしましょう。

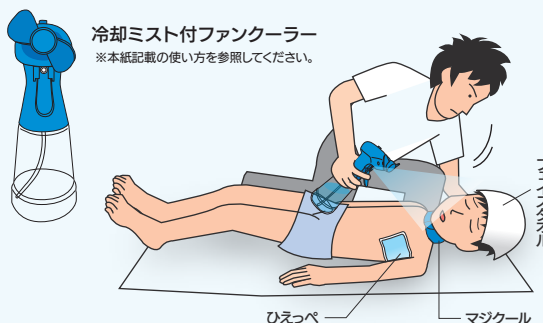

補給

水分・塩分の補給

注意 意識が無い場合に無理に水分をとらせると、水分が気道に流れ込む可能性があり危険です。とにかく医療機関への搬送が第一です。



ひえっぺ(瞬間冷却パック)

使い方説明有り



フェイスタオル



ネッククーラー マジクール(冷感持続ネッククーラー)

※マジクールの色柄・タイプは予告なく変更します。

使い方説明有り



水

※空ペットボトルに水道水を入れてご使用ください。



冷却ミスト付ファンクーラー

使い方説明有り

乾電池